

TINEARITY™ G1

Solution innovante pour le soulagement des acouphènes


Tinearity™ G1 est un dispositif médical complètement nouveau et unique, classé Medtech, destiné exclusivement au traitement et au soulagement des acouphènes. Développé comme une aide pour les personnes souffrant d'acouphènes dans les situations de la vie quotidienne et pendant le sommeil.



Tinearity™ G1 se compose de deux générateurs sonores qui sont encliquetés dans des adaptateurs fixés de manière adhésive derrière les oreilles. Via les générateurs sonores, un bruit blanc est transféré directement dans la cochlée par conduction osseuse, ce qui masque partiellement ou complètement les acouphènes gênants. Cette conception unique offre plusieurs avantages tels que:

- La parole normale n'est pas obstruée dans le conduit auditif..
- Vous pouvez dormir avec le dispositif sans ressentir d'irritations dans le conduit auditif.

L'audition par conduction osseuse désigne la transmission directe des vibrations sonores à l'oreille interne par les os du crâne, sans passer par l'oreille externe ni l'oreille moyenne. Comme illustré à droite : l'adaptateur est fixé à la peau derrière l'oreille. Le générateur de sons transmet des vibrations de bruit blanc via l'adaptateur à la peau. Celle-ci transmet ensuite ces vibrations à la cochlée, l'organe de l'audition, laissant le conduit auditif totalement libre.

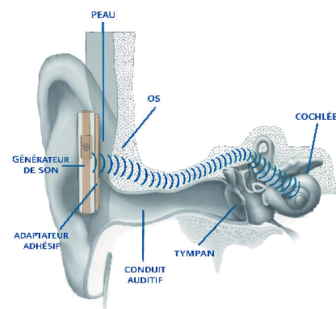

Indications: Destiné aux patients présentant une audition normale, ou une perte auditive légère



Plaque de chargement avec câble pour une recharge facile. Les générateurs de sons se rechargent en 4 heures

Deux générateurs de sons qui produisent un bruit blanc grâce à l'os du crâne. Encliquetés-les aux adaptateurs et placez-les derrière les oreilles.

Supports adhésifs, ils servent à maintenir les générateurs de sons en place derrière l'oreille. Ils sont testés pour détecter tout risque d'irritation ou de sensibilisation cutanée

Mode d'emploi simplifié

1. Préparation

Nettoyer et sécher soigneusement la peau derrière l'oreille.

2. Application

- Appliquer le support adhésif sur l'os mastoïde.
- Appuyer 20 secondes.
- Encliqueter le générateur jusqu'au 'clic'.
- Allumer (pression brève).
- Régler le volume juste en dessous du niveau des acouphènes.

3. Utilisation

Port quotidien selon les besoins.

Peut être utilisé pendant le sommeil.

En cas d'irritation persistante ou d'inconfort, consulter un professionnel de santé.



MLM Medical
Tél: +33 (0) 4 93 63 19 57
Courriel: info@mlmmmedical.fr
Site: mlmmmedical.fr
BP20041
06602 Antibes Cedex - France



2026/02/02