

Tinearity™

Tinearity™ G1: Une solution innovante contre les acouphènes

70% d'amélioration*



- Design suédois épuré et discret
- Générateur de bruit blanc
- Transmission par conduction osseuse
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie continue
- Batterie avec durée de vie jusqu'à 2 ans
- Solution non invasive, sans gêne du conduit auditif
- Port confortable, y compris pendant le sommeil
- Utilisation simple et continue au quotidien



*Assessing the Efficacy of a Novel Bone Conduction Tinnitus Suppression Device: A 30-Day Pilot Study on Clinical and Audiological Outcomes, Tiago Eça MD1, Claudia Rosa MD1, Maria José Santos MD1, Mikael Åström MSc PhD2, Luís L MD PhD1,3

Tinearity™ G1

La liberté de soulager vos acouphènes en toute discrétion.

Tinearity™ G1 est un dispositif médical innovant destiné au soulagement des acouphènes par conduction osseuse. Il diffuse un bruit blanc directement vers la cochlée.

Son intérêt majeur réside dans sa discrétion, son confort - y compris pendant le sommeil - et l'absence d'obstruction du conduit, permettant aux patients de continuer à entendre normalement les sons environnants et la parole.

Il constitue ainsi une solution pratique, non invasive et adaptée à un usage quotidien pour les patients présentant une audition normale ou une perte auditive légère.

Le dispositif est conçu pour une utilisation quotidienne, à long terme, selon les besoins du patient.



Fixer les supports adhésifs derrière chaque oreille sur une peau propre et sèche.

Clipper les générateurs sonores sur les supports et les allumer.

Le dispositif doit être porté aussi longtemps que nécessaire, et les générateurs sont rechargés sur la station prévue à cet effet

Réf. 6000 - Kit Tinearity™ G1 composé de:

- Deux générateurs sonores (diffusion de bruit blanc par conduction osseuse)
- 62 adaptateurs adhésifs pour fixation derrière les oreilles (environ 1 mois d'utilisation quotidienne)
- Une plaque de recharge avec câble pour le chargement des générateurs

Réf. 6042 - Boîte de 186 supports adhésifs Tinearity



MLM Médical
Tél : +33 (0) 4 93 63 19 57
Courriel: info@mlmmedical.fr
Site: mlmmedical.fr
BP20041
06602 Antibes Cedex - France



MLM Medical 2026/02