

Otinova® spray auriculaire (FR)

A quoi sert Otinova ?

Otinova est utilisé pour traiter l'inflammation/l'eczéma du conduit auditif, également connu sous le nom d'oreille du nageur (otite externe).

Comment fonctionne Otinova ?

Otinova agit localement, comme astringent, soulage les démangeaisons et a un effet antibactérien et antifongique.

Que contient Otinova ?

Otinova contient de l'acétate d'aluminium et de l'acétotartrate d'aluminium (1,8% d'aluminium), de l'acide acétique, de l'eau, pH 3-4 (Solution de Burow, Pharmacopée britannique). 15 ml (150 doses).

Informations importantes à connaître avant d'utiliser Otinova

Otinova ne doit pas être utilisé si le tympan a été équipé d'un drain ou si le tympan est suspecté d'être perforé. Otinova ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 5 ans, sauf sur recommandation d'un médecin (contrôle du tympan). Contacter un médecin en cas d'inconfort considérable, de sensibilité dans et autour de l'oreille et d'altération de l'audition. En cas d'inconfort considérable, éviter le contact avec l'eau et ne pas mettre le doigt à l'intérieur de l'oreille. Éviter également le savon et le shampoing. Éviter le contact avec les yeux. Éviter d'inhaler le spray. Conserver hors de portée des enfants.

Posologie

Vaporiser une à deux fois dans le conduit auditif, matin et soir. Incliner la tête après la pulvérisation afin que le liquide s'écoule le plus possible dans le conduit auditif. Essuyer tout excès de liquide. Utilisé pour le traitement de l'otite externe, par ex. à la suite de contacts fréquents avec l'eau et/ou des environnements humides, comme la natation/les sports aquatiques pratiqués en vacances. Si les symptômes n'ont pas fortement diminué après 1 à 3 jours de traitement, contacter votre médecin. Une précipitation de sel dans le conduit auditif et une grave déshydratation peuvent survenir en cas de surdosage et/ou d'utilisation prolongée. Ne pas poursuivre l'utilisation d'Otinova au-delà de 7 jours.

Mode d'emploi

Tenez la bouteille à la verticale. Avant la première utilisation du spray, pompez plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'un spray uniforme. Tenez l'embout de l'embout contre le conduit auditif externe et pompez une ou deux fois.

Quels sont les effets secondaires possibles d'Otinova ?

Otinova peut provoquer une légère irritation/une sensation de picotement temporaire dans le conduit auditif. Si la sensation d'irritation/de picotement persiste ou s'aggrave, il convient de contacter un médecin. De rares cas d'hypersensibilité locale ont été rapportés. Des cas individuels de tympan perforé sont survenus en association avec des précipitations extrêmes de sel à des doses élevées pendant des périodes continues de plus de 20 jours. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Stockage et durée de conservation

Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur l'emballage. A utiliser dans les 6 mois après ouverture.

Notice révisée : 2023-05-23

Fabriqué par: Circius Pharma AB S. Långebergsgatan 34-36 SE-436 32 Askim, Sweden www.circiuspharma.se

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF France : MLM MEDICAL - BP20041 – 06602 Antibes Cedex France

Site : <https://mlmmedical.fr> Email : info@mlmmedical.fr Tél : 04 93 63 19 57